



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Компрессионные гольфы Venosan

руководство пользователя





1. **Тип товара:** компрессионные гольфы

2. **Характеристики**

- Материалы: 40% Полиамид, 30% Эластан, 20% натуральный хлопок, 10% серебряная нить X-Static
- Размеры: 20-23, 23-26, 26-29
- Класс компрессии: II
- Размеры упаковки: 230 x 130 x 35 мм
- Вес в упаковке: ~180 г
- Страна-производитель: Швейцария



Ваши VENOSAN® были изготовлены с применением самых новых знаний в области медицины и современной текстильной технологии. Они содержат экологические волокна (испытанные в соответствии со стандартом Öko-Tex 100), которые улучшают качество жизни и Ваше самочувствие на продолжительный период. Изделия VENOSAN® отвечают действующим в настоящее время национальным и международным предписаниям. Они носят знак качества для медицинских компрессионных чулок и периодически подвергаются испытаниям в официальных контролирующих институтах. В случае с изделиями VENOSAN® речь идёт о медицинском вспомогательном средстве. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы Вы тщательно прочитали настоящую Инструкцию по применению.

### **Важно**

Необходимо постирать трикотаж перед использованием!

Посоветуйтесь со специалистом, прежде чем впервые надеть Ваши чулки.

Важно, чтобы размер и форма точно подходили для Вашего тела.

Никогда не заворачивайте верхний край чулок вниз. В результате этого давление увеличивается в два раза, и это может привести к опасным застоям.

Если при ношении медицинских компрессионных чулок боли в ногах усилятся или если Вы плохо себя почувствуете, Вам необходимо сразу же проконсультироваться у врача или специалиста. Следите за тем, чтобы обувь была хорошей и не повреждала тонкий трикотаж медицинских компрессионных чулок. Определённые мази и масла могут разрушить Ваши чулки или оставить на них неприглядные пятна.

При использовании чулок и уходе за ними в соответствии с указаниями длительность применения составляет 6 месяцев. По истечении этого срока медицинское действие уже не может быть гарантировано, и мы рекомендуем Вам покупку новых чулок. Вы можете также получить консультацию на нашем сайте в Интернете [www.venosan.com](http://www.venosan.com).

### **Надевание**

Острыми или растрескавшимися ногтями на пальцах, шероховатыми руками, кольцами с острыми краями, браслетами, часами и т.д. можно повредить тонкий трикотаж изделий VENOSAN® при надевании и снятии. Для этого целесообразно надевать обычные бытовые перчатки. Действуйте следующим образом:

1. Следите за тем, чтобы ступни и ноги не были ни влажными, ни мокрыми. В необходимых случаях может быть полезной пудра.
2. Выверните чулок до лодыжки, чтобы вся внутренняя сторона VENOSAN® до следа чулка была вывернута наизнанку.
3. Растяните теперь след чулка большими пальцами рук в стороны и наденьте VENOSAN® на ступню.
4. Возьмитесь за верхний край и натяните чулок на пятку.
5. Когда чулок прилегает к ноге, поочерёдно разгладьте трикотаж вверх, захватывая его большими пальцами изнутри.

Ваши VENOSAN® изготовлены из высокоэластичного материала. Поэтому нельзя тянуть верхний край чулка изо всех сил, его нужно, как описано в пункте 5, поочерёдно разглаживать вверх.

### **Снятие**

1. Опустить верхний край чулка вниз и стянуть его через пятку.
2. Вставить между чулочным изделием и ногой большой палец и вывернуть чулок до пятки.
3. Медленно снять чулок до ступни.



### **Стирка и уход**

Ваши VENOSAN® можно без проблем стирать в стиральной машине до 40 °С, а в остальном с ними можно обращаться как с обычным синтетическим нижним бельём. Частая стирка не вредит Вашим чулкам. Не применяйте при стирке смягчающие средства, оптические отбеливатели или пятновыводители (такие, как терпентин, бензин и т.д.). Пожалуйста, иногда протирайте внутреннюю сторону силиконовой удерживающей ленты алкоголем для улучшения удержания.

### **Показания**

Варикозное расширение вен, как первичное, так и вторичное, расширение вен при беременности, поддержка склерозирующей терапии, состояние после хирургических вмешательств на венах, поверхностный тромбофлебит, а также состояние после излечения тромбофлебита, тромбоз глубоких вен голеней, состояние после тромбоза, посттромботический синдром, профилактика тромбоза у подвижных пациентов, CVI стадий от I до III по Видмеру или, соотв., C1S – C6 по CEAP, профилактика изъязвлений, недостаточность проводниковых (глубоких) вен, ангиодисплазия, лимфатический отёк, отёки беременных, посттравматический отёк, послеоперационный отёк, циклический идиопатический отёк, жировой отёк начиная от стадии II, застойные состояния вследствие нарушения подвижности (артрогенный застойный синдром, парезы и частичные парезы конечностей).

Прочие показания: послеожоговые состояния, лечение рубцов.

### **Противопоказания**

При нижеуказанных болезнях запрещается пользование медицинскими компрессионными чулками VENOSAN®.

Полный запрет при

- Тяжёлом нарушении артериального кровоснабжения
- Тяжёлой невропатии
- Тяжёлой микроангиопатии
- Для лежачих больных

Относительный запрет при

- Ярко выраженных отёках
- Мокнущих воспалениях кожи
- Декомпенсированной сердечной недостаточности
- Сразу же после глубоких тромбозов

В случае невыполнения названных условий изготовитель снимает с себя всякую ответственность.

### **Риски и побочные действия**

При носке чулок с силиконовой полоской возможно возникновение раздражения у людей с чувствительной кожей.

### **Хранение**

Храните чулки при комнатной температуре, в месте, защищённом от влаги и солнечных лучей.



- 
3. **Комплектация**
    - Компрессионные гольфы Venosan
    - Документация
  
  4. **Страна-разработчик: Швейцария**  
**Страна-производитель: Швейцария**